



Toda la precisión del **GUTH 38** con la innovación ahora sin boquillas.

GUTH-38-SB es un alcoholímetro con tecnología de punta y sencillo de usar, capaz de detectar alcohol etílico a partir de una muestra válida de aliento, brindando resultados cuantitativos de alta precisión en menos de 10 segundos.

Por su celda de combustión electroquímica, el GUTH-38-SB, permite medir la concentración de alcohol y su porcentaje convertido a "BrAC", mostrado en la pantalla. Gracias a su cono de toma de aliento detecta hasta el más mínimo grado de alcohol.

Su memoria almacena los resultados obtenidos y permite tenerlos disponibles para ser descargados en una computadora.

Le invitamos a conocer la diferencia y calidad.

## Información técnica



|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Dimensiones                       | 127mm x 58mm x 25mm aprox.                         |
| Peso                              | 107g Sin batería aprox.<br>141g Con batería aprox. |
| Fuente de poder                   | Batería recargable de litio                        |
| Pantalla                          | 45mm   |
| Memoria de almacenamiento         | Hasta 4,000 resultados con fecha y hora            |
| Tiempo de calentamiento           | 10-20 segundos                                     |
| Tiempo de soplado                 | 4 segundos   |
| Tiempo de respuesta               | 5-10 segundos                                      |
| Temperatura de operación          | -5° C ≈ 45° C                                      |
| Rango de detección                | 0.000 - 0.300 %BrAC                                |
| Tecnología de celda de combustión | ± 0.05 % - 0.002% BrAC                             |
| Garantía                          | Limitada de 1 año                                  |

## Forma de uso

1. Presione el botón ON/OFF.
2. La pantalla mostrará brevemente la palabra "WAIT" (ESPERE), mientras el alcoholímetro hace la función de calentamiento.
3. Enseguida mostrará la palabra "BLOW" (SOPLA) que se deslizará a través de la pantalla.
4. Instruya a la persona que se someterá a la prueba a que tome aire profundamente, acerque su boca a 1 pulgada del cono de aliento (foto) y sople larga y continuamente durante 4 segundos. La barra de estado en la parte inferior de la pantalla se iluminará y progresivamente se moverá a la derecha hasta que el equipo reciba una muestra aceptable. Mientras la persona provee una muestra de aliento, un tono audible se emitirá señalando que la presión emitida es adecuada para su procesamiento.



Nota: El operador tiene alrededor de 20 segundos para que la persona provea la muestra de aliento antes de que el equipo exceda el tiempo límite y regrese a la pantalla del menú principal.

5. La muestra de aliento se almacenará automáticamente en el GUTH-38-SB siempre y cuando cumplan los requisitos necesarios.

### TABLA DE LECTURA DE RESULTADO BAC

| Lectura      | Rango                | Descripción   | Reacción del aparato  |
|--------------|----------------------|---|---|
| .00% a .01%  | Rango seguro         | Consumo de muy poco o nada de alcohol                 | (No hay advertencias especiales)                                      |
| .01% a .49%  | Rango Moderado*      | Mayor consumo de alcohol                              | (No hay advertencias especiales)                                      |
| .50% y mayor | Rango de Advertencia | La persona no se encuentra en condiciones de conducir | El indicador de ADVERTENCIA comienza a parpadear y se escucha un tono |

\*CUALQUIERA que sea la cantidad que se consuma de alcohol puede alterar nuestra capacidad para conducir un vehículo. NO existe un nivel "seguro" de consumo de alcohol antes de conducir. Si toma NO MANEJE.



### Accesorios incluidos con el GUTH-38

- 1 Alcoholímetro GUTH-38-SB
- 1 Estuche transportador
- 1 Funda para Alcoholímetro
- 1 Cargador AC
- 1 Cargador DC para auto
- 1 Cable de datos USB
- 1 Manual de usuario