



### Fácil de Usar

Fácil de interpretar los iconos e indicadores de nivel de batería. Modo de niveles variables para un muestreo más preciso y modo especial abrir contenedor para bebidas y derrames. Muestra la curva de alcohol mientras que proporciona instrucciones para asegurarse de tomar la prueba adecuada.

### Innovación del Producto

Sensor de Presión (la prueba no se desempeña hasta que el sujeto sopla. No requiere boquillas. Esta fabricado en E.E.U.U.

### Instrumento de Precisión

Respuesta inmediata en negativos y <10 segundos en positivos. Recuperación inmediata en negativos y <30 segundos en positivos. El mejor alcoholímetro de su clase en temperatura de operación.


### Contenido del equipo

- Alcoholímetro
- Estuche de plástico
- 4 pilas AA
- Correa de Mano
- Instructivo
- 1 año de garantía



## Modo de Empleo


### PRUEBA AUTOMÁTICA

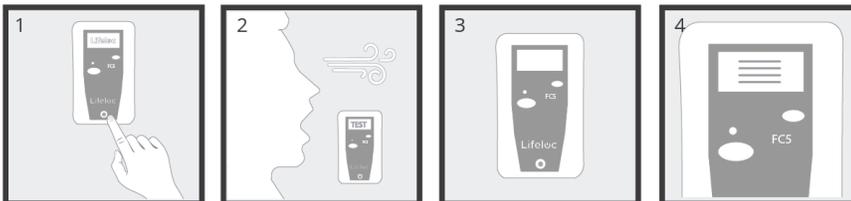

#### Prueba Automática

1. Sopla en el sistema de muestreo del alcoholímetro 4" ó 10 cm de la boca del sujeto.
2. Verificar el flujo constante de la prueba para resultados precisos
3. La prueba se activará automáticamente una vez que el sujeto ha proporcionado una muestra adecuada.
4. Lea los resultados.


### PRUEBA MANUAL

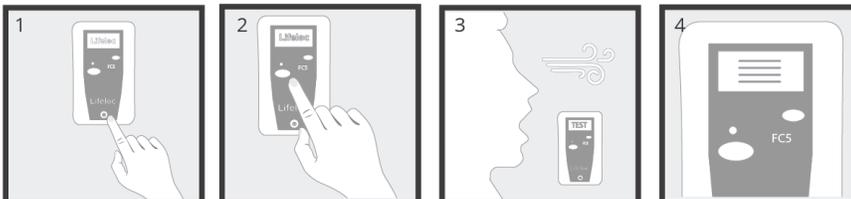

#### Prueba Manual

1. Sopla en el sistema de muestreo del alcoholímetro 4" o 10 cm de la boca del sujeto.
2. Indique al sujeto a soplar constantemente hacia el cono.
3. Una vez que el sujeto empieza a soplar, pulse el botón Ejecutar para iniciar la prueba.
4. Lea los resultados.

### PRUEBA PASIVA / AMBIENTAL

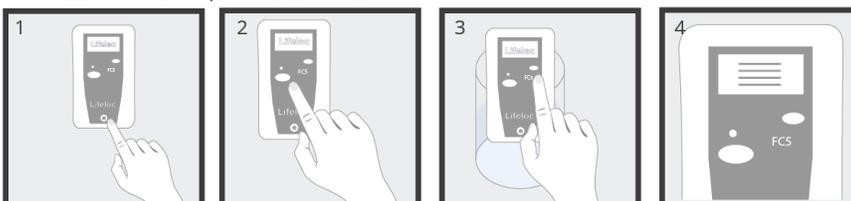

#### Prueba Ambiental

1. En cualquiera de los otros modos, ondee la unidad en el aire y pulse el botón ejecutar para iniciar la prueba.
2. Lea los resultados.