



**CLEAN
DIAGNOSTICS**
Experiencia y calidad a su servicio

Prueba Multidrogas en Frasco

Frasco multidrogas de 5 y 6 parámetros de fácil uso.



One Second Technology

Una tecnología única en el mercado, con absorción en 1 segundo y resultados ciertos en menos de 5 minutos.

Bajo pedido: A elegir entre 21 diferentes drogas, hasta 14 parámetros en cada frasco.

Ventajas



Vaso todo en uno.



Resultados en menos de 5 minutos.



Fabricado en Estados Unidos.



Termómetro integrado.



Segura, fácil de usar y fácil de leer.



Tira de adulteración (opcional).




Etiqueta de seguridad.

Parámetros a elegir

- Anfetaminas
- Barbitúrico
- Buprenorfina
- Benzodiacepina
- Cocaína
- Cotonina
- Metadona
- Propoxifeno
- Marihuana
- Tramadol
- Etil Glucurónido
- Norfentanilo
- Marihuana sintética
- Éxtasis
- Metanfetaminas
- Metadona
- Morfina
- Opiáceos
- Oxidodona
- Fenciclidina
- Antidepresivos tricíclicos

Interpretación de resultados

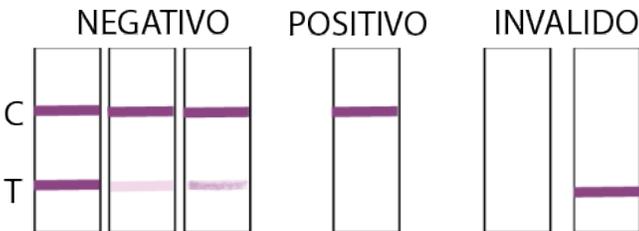

POSITIVO: Una línea aparece en el área de control (C). Ninguna línea aparece en el área de prueba (T). Este resultado positivo indica que la concentración de droga está por encima de los niveles mínimos detectables.

NEGATIVO: Dos líneas aparecen. Una línea coloreada debe estar en el área de control (C) y otra sin importar su intensidad de tonalidad en el área de prueba (T). Este resultado negativo indica que la concentración de droga está por debajo de niveles detectables.

INVÁLIDO: La línea en el área de control (C) no aparece. Volumen de muestra insuficiente o técnica de procedimiento incorrecta son las más probables causas de esta invalidez.