



**CLEAN
DIAGNOSTICS**
Experiencia y calidad a su servicio

One Second Tarjeta

Prueba rápida para la detección de drogas de abuso.



One Second Technology

Una tecnología única en el mercado, con absorción en 1 segundo y resultados certeros en menos de 5 minutos.

Tarjeta multidrogas de 3, 5 y 6 parámetros de fácil uso.

Cartucho Sellado: A diferencia del resto la prueba puede ser completamente sumergida en la muestra sin afectar las tiras reactivas.



Ventajas



Segura, fácil de usar y fácil de leer.



Resultados en menos de 5 minutos.



Fabricado en Estados Unidos.



Tira de adulteración (opcional).




Incluyen vasos recolectores para la toma de muestras de orina

Parámetros a elegir

- Anfetaminas
- Barbitúrico
- Buprenorfina
- Benzodiacepina
- Cocaína
- Cottonina
- Metadona
- Propoxifeno
- Marihuana
- Tramadol
- Etil Glucurónido
- Norfentanilo
- Marihuana sintética
- Éxtasis
- Metanfetaminas
- Metadona
- Morfina
- Opiáceos
- Oxidodona
- Fenciclidina
- Antidepresivos tricíclicos

Instrucciones y resultados

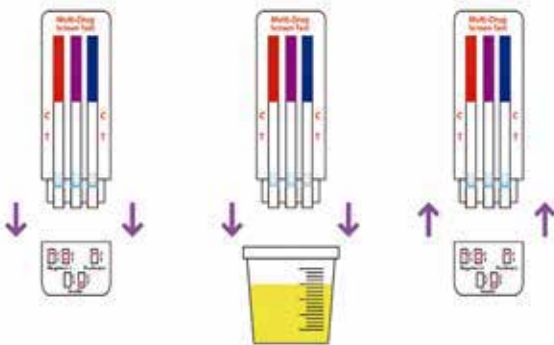

POSITIVO: Una línea aparece en el área de control (C). Ninguna línea aparece en el área de prueba (T). Este resultado positivo indica que la concentración de droga está por encima de los niveles mínimos detectables.

NEGATIVO: Dos líneas aparecen. Una línea coloreada debe estar en el área de control (C) y otra sin importar su intensidad de tonalidad en el área de prueba (T). Este resultado negativo indica que la concentración de droga está por debajo de niveles detectables.

INVÁLIDO: La línea en el área de control (C) no aparece. Volumen de muestra insuficiente o técnica de procedimiento incorrecta son las más probables causas de esta invalidez.