



Es una prueba rápida con un método altamente selectivo para detectar la presencia de alcohol en saliva y proporciona una aproximación a la concentración de alcohol en sangre, se interpreta visualmente comprobando el color con otros proporcionados para concentraciones relativas de alcohol en sangre.



## CARACTERÍSTICAS


- Tira reactiva rápida y fácil de usar para comprobar el nivel de alcohol en la saliva
- Resultados en solo 2 minutos
- La tabla de colores proporciona concentraciones relativas aproximadas de alcohol en sangre (BAC) de 0,02 % a 0,30 %
- No requiere instrumentación
- La prueba de alcohol en saliva evita la recolección de orina
- Permite pruebas rápidas de alcohol in situ
- Cada tira de prueba está envuelta individualmente en papel de aluminio.
- La tira de prueba de alcohol en saliva CERTUM tiene la marca CE para la venta en la Unión Europea
- Económica - Con una única tira tiene una excelente relación costo/beneficio y efectividad con una pequeña muestra.
- No requiere equipo Adicional

## INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

Cada lámina de tira de prueba de alcohol tiene una guía de comparación de resultados de color que permite obtener resultados de prueba rápidos.

Simplemente haga coincidir el color de la almohadilla con la guía de comparación en la lámina.


- 0.0 si no se detecta alcohol
- 80 mg/100ml
- 20 mg/100ml
- 300 mg/100 ml

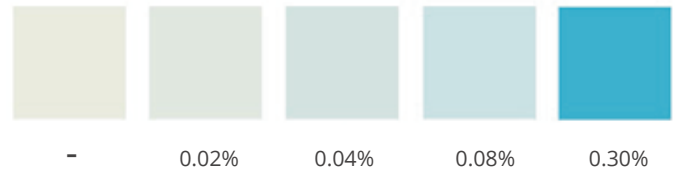


## MODO DE EMPLEO



Aplicar la saliva directamente en la almohadilla

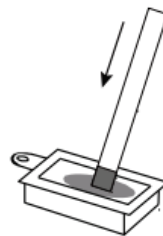

Sature de saliva la punta de la tira de 6 a 8 segundos

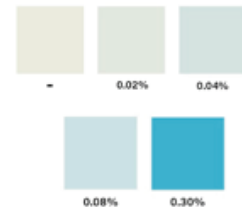

Compare después de 2 minutos los resultados con la tabla de colores que indica el %BAC