


Inmunoensayo basado en el principio de unión competitiva. Las drogas que pueden estar presentes en la muestra de saliva compiten contra sus respectivos conjugados farmacológicos para los sitios de unión en su anticuerpo específico.

Detecta sustancias toxicológicas simultáneamente

- | | | | |
|------------------|------------|-----------------|----------------|
| » Anfetaminas | » EDDP | » Metanfetamina | » Oxiconona |
| » Barbitúrico | » K2 | » Éxtasis | » Fenciclidina |
| » Benzodiazepina | » Ketamina | » 6-MAM | » Propoxifeno |
| » Buprenorfina | » Metadona | » Opiáceos | » Marihuana |
| » Cocaína | | | |



MODO DE USO

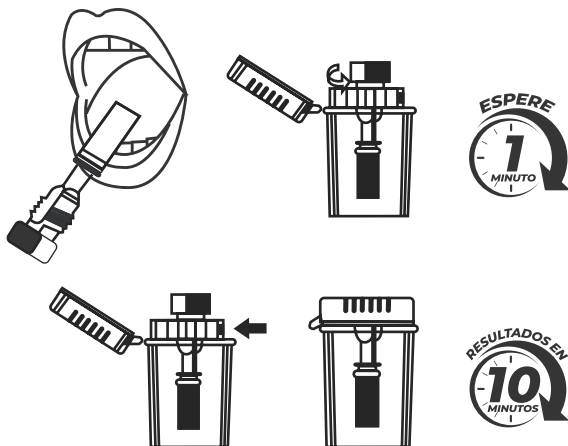

- Lleve las pruebas, muestras y controles a temperatura ambiente (15-30 °C) antes de su uso. La muestra de líquido oral debe recolectarse utilizando el recolector que se proporciona con el kit. No se deben utilizar otros dispositivos de recolección con este ensayo.
- Indique al donante que no coloque nada en la boca, incluidos alimentos, bebidas, goma de mascar o productos de tabaco, durante al menos 10 minutos antes de la recolección.

- Haga que el donante pase en el interior de la boca (mejillas, encías y lengua) el hisopo de recolección varias veces, luego mantenga el hisopo en la boca hasta que el color de la tira indicadora de saturación aparezca en la ventana indicadora del hisopo de recolección. Importante: Indique al donante que no muerda, chupe ni mastique la esponja.

NOTA: Después de 7 minutos, continúe con la prueba, incluso si el color del indicador de saturación no ha aparecido en la ventana del indicador.

- Retire el hisopo de recolección de la boca e insértelo, primero con una esponja, en el dispositivo de detección. Enrosque la tapa con fuerza para mezclar la saliva y el buffer.
- Espere 1 minuto, luego presione el interruptor de la taza hacia el otro lado y cubra la tapa de la taza.
- Pruebe el dispositivo en posición vertical sobre una superficie plana y manténgalo en posición vertical mientras se realiza la prueba. Espere a que aparezcan las bandas de colores en el área de resultados de la prueba. Lea los resultados a los 10 minutos. No interprete el resultado después de 20 minutos.

NOTA: Una vez que el hisopo de recolección se fija en su lugar, el dispositivo es hermético, a prueba de manipulaciones y listo para ser desechado o enviado al laboratorio para su confirmación (en presunto resultado positivo).

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

