



CLEAN  
DIAGNOSTICS  
Experiencia y calidad a su servicio

# Accutrend Plus®

Sistema de monitoreo de glucosa, colesterol y triglicéridos en la sangre




Accutrend Plus® es un dispositivo flexible y portátil que permite analizar los tres parámetros clave: colesterol total, triglicéridos y glucosa. Un dispositivo rentable y multiuso que proporciona una excelente eficacia analítica en comparación con los análisis estándar de laboratorio. Además permite almacenar hasta 100 mediciones diferentes con fecha, hora y marcas de valor alto o bajo.

Seguridad integrada para resultados exactos. Accutrend Plus® permite aplicar la muestra de sangre en la tira en el propio medidor o fuera de éste. Por ejemplo, cuando lleve a cabo varios análisis, en los que la contaminación cruzada puede suponer un problema, aplique la sangre fuera del dispositivo.

Gracias al funcionamiento automático integrado y al autodiagnóstico del medidor, Accutrend Plus® realiza numerosas comprobaciones de seguridad para evitar posibles errores y fallos en el funcionamiento, por lo que puede confiar en la exactitud de los resultados.

Las tiras de codificación con identificación positiva del lote de tira y reconocimiento de parámetros, se utilizan para calibrar el dispositivo: una característica de seguridad adicional que garantiza el rendimiento constante del sistema.

## Características

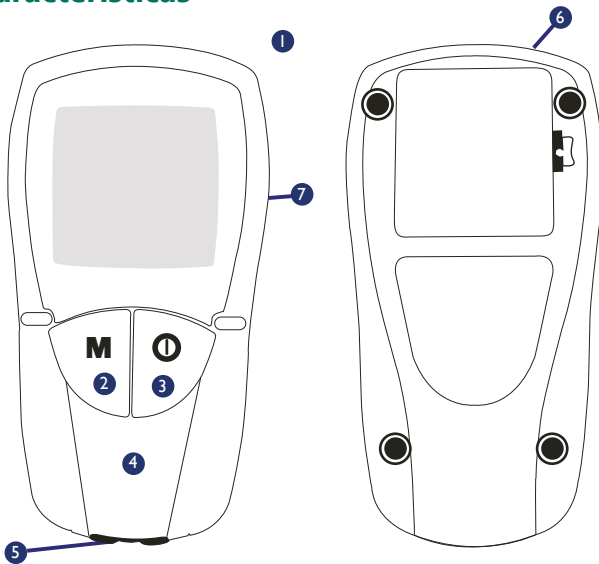

\*Las Tiras de Pruebas de Colesterol, Triglicéridos y Glucosa en la Sangre Accutrend Plus® se venden por separado.

### 1 Pantalla.

Muestra los resultados de las mediciones, información, símbolos y todos los valores medidos guardados.

### 2 Tecla M (memoria).

Pulse esta tecla para recuperar todos los valores guardados y (pulsando también la tecla Set-Ajustar) para ajustar todos los parámetros del instrumento.

### 3 Tecla Encendido/Apagado.

Pulse esta tecla para encender y apagar el instrumento.

### 4 Tapa de la cámara de medición.

Para aplicar la muestra, abra esta tapa.

### 5 Guía de tiras reactivas.

Inserte aquí la tira reactiva.


### 6 Tecla Set-Ajustar.

Pulse esta tecla para corregir los diversos ajustes del instrumento. Esta tecla también le permite desplazarse por los distintos parámetros de análisis para ver los números de código actualmente guardados (antes de la medición).

### 7 Ventana de infrarrojos.

La interfaz para infrarrojos le permite transferir los datos guardados.

## Tira Reactiva

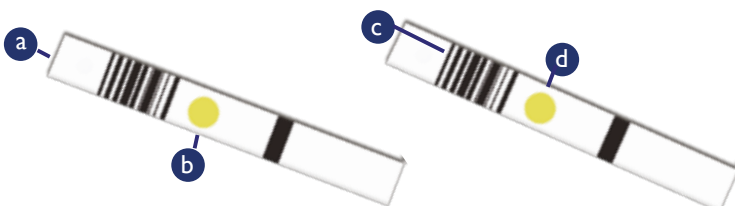

### A Tira reactiva (cara superior, TG en el ejemplo)

Contiene el área de aplicación.

### B Área de aplicación

Aplique aquí la muestra.

### C Tira reactiva (cara inferior)

El código de barras impreso se utiliza para identificar el tipo y el lote de la tira reactiva.

### D Área de reacción

Se utiliza para comprobar visualmente si se ha aplicado la sangre correctamente.

### Procedimiento



#### Primer paso:

Encienda el instrumento e introduzca una tira reactiva. Una flecha parpadeante le indicará que abra el dispositivo para aplicar la muestra de sangre.



#### Segundo paso:

Utilice el dispositivo de punción para obtener una muestra de sangre capilar y aplíquela directamente a la tira (también puede aplicar la muestra de sangre en la tira reactiva fuera del instrumento y después volver a introducirla).



#### Tercer paso:

Cierre la tapa y espere los resultados. Una vez finalizada la medición, aparecerán los valores en pantalla y, en su caso, una marca de valor alto o bajo.

### Importante

#### Siempre...

A. Use el instrumento a temperaturas aceptables para el análisis en cuestión (consulte también los instructivos de las tiras reactivas):

- Para el colesterol y los triglicéridos: 18-30 °C
- Para la glucosa: 18-32 °C

B. Coloque el instrumento sobre una superficie nivelada o sosténgalo con pulso firme en la mano.

C. Asegúrese de que aparezcan todos los elementos de la pantalla durante la autocomprobación.

D. Lea los instructivos de las tiras reactivas.

E. Mantenga limpias la cubierta y la guía de tiras reactivas.

#### Nunca...

A. Toque ni extraiga la tira reactiva durante la propia medición (aunque puede hacerlo antes de que ésta comience cuando se aplica la sangre fuera del instrumento).

B. Retrase el comienzo de la medición una vez aplicada la sangre.

C. Somete el instrumento a movimientos bruscos durante una medición.

D. Guarde el instrumento y las tiras a temperaturas extremas.

E. Guarde el instrumento y las tiras en condiciones de humedad sin protección adecuada.

**Favor de leer con atención las instrucciones sobre el producto en el manual de usuario antes de utilizarlo.**

**Si no se siguen las instrucciones anteriores, pueden generarse resultados falsos.**