



**CLEAN  
DIAGNOSTICS**  
Experiencia y calidad a su servicio

# On Call® Plus

Diabetes bajo control, sin dolor y con resultados precisos

El Sistema On Call Plus para monitoreo de glucosa en sangre le brinda resultados altamente confiables y exactos. El Glucómetro On Call Plus utiliza una tecnología de biosensor con chip codificado.

El monitoreo regular de la glucosa en sangre capilar es una parte esencial del manejo de la diabetes. Al seguir las mejores prácticas y trabajar en estrecha colaboración con su equipo de atención médica, los pacientes con diabetes pueden lograr un excelente control de su enfermedad y mejorar su calidad de vida.

Su rango de medición es de 20-600 mg/dL y requiere una muestra de sangre capilar o venosa de 1 uL.

On Call Plus es un equipo medidor de glucosa mundialmente probado, que brinda un gran desempeño y facilidad de uso.



**Preciso**



**Confiable**



**Resultados rápidos**



**Portatil**

## Modo de uso



- 1 Inserte una tira en el puerto de la tira, haga contacto con las barras con el extremo de la tira mirando hacia arriba, para encender el medidor y se puedan observar en la pantalla todos los segmentos.



- 2 El destello de la tira de examen y el ícono de la gota de sangre indican que la tira de examen se ha insertado correctamente y que se puede añadir la gota de sangre.



- 3 Toque la punta de la muestra al extremo de la tira de examen con la muestra de la gota de sangre.



- 4 El medidor contará hacia abajo de 9 a 1 y luego mostrará los resultados del análisis.



**CLEAN  
DIAGNOSTICS**  
Experiencia y calidad a su servicio

# On Call® Plus

Diabetes bajo control, sin dolor y con resultados precisos

## Especificaciones Técnicas

### Características

### Detalles

|                                         |                                                    |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Tecnología</b>                       | Biosensor / electroquímica, glucosa oxidasa        |
| <b>Tiempo de prueba</b>                 | 10 segundos                                        |
| <b>Volumen</b>                          | 1,0 ul                                             |
| <b>Resultados de la Calibración</b>     | Plasma-equivalente (Complicado con IFCC)           |
| <b>Tipo de Muestra</b>                  | Sangre entera fresca (capilar)                     |
| <b>Rango de Temperatura</b>             | 5 – 45oC (41 – 113oF)                              |
| <b>Rango de Humedad</b>                 | 10 – 90%                                           |
| <b>Batería</b>                          | 3.0 V de litio (pila de botón)                     |
| <b>Duración de la Batería</b>           | 1000 mediciones                                    |
| <b>Método de Calibración</b>            | Chip de códigos                                    |
| <b>Rango de Medición</b>                | 1,1 a 33,3 mmol/L (20 – 600mg/dL)                  |
| <b>Caducidad de las Tiras Reactivas</b> | 24 meses                                           |
| <b>Almacenamiento de Memoria</b>        | 300 resultados con fechas y hora                   |
| <b>Promedios de Pruebas</b>             | 7, 14 y 30 días                                    |
| <b>Puerto de Transferencia de Datos</b> | USB                                                |
| <b>Apagado Automático</b>               | 2 minutos después de la última acción              |
| <b>Empaque Único</b>                    | Tiras de prueba envueltas individualmente          |
| <b>Otras Características</b>            | Detección Automática de temperatura y compensación |

