

MEDIDOR DE LÍPIDOS MISSION®

Permite realizar mediciones de Colesterol, HDL y Triglicéridos

El Medidor de Lípidos Mission® se destaca por su versatilidad al permitir elegir realizar pruebas individuales para Colesterol, HDL y Triglicéridos, o bien realizar con una sola muestra un perfil de lípidos que incluye mediciones de colesterol total, HDL y Triglicéridos, así como resultados calculados para LDL y factor de riesgo cardíaco

Parámetros disponibles



Panel 3 en 1



Colesterol Total



Triglicéridos



Colesterol HDL



Beneficios

- Permite pruebas individuales o multiparamétricas.
- Resultados rápidos (15 segundos en pruebas individuales / 45 segundos en multiparamétricas).
- Amplia gama de hematocrito de 0 - 50%.
- Permite procesar muestras de sangre, suero y plasma.
- Permite exportar resultados a formato de excel, a través de cable USB, mediante un software gratuito.
- Ideal para hospitales, uso en el hogar, campañas de salud pública y profesionales de la salud.



Eficiente



Confiable



Resultados rápidos




Fácil de Utilizar

Modo de uso



1 Inserte el dispositivo en el equipo.

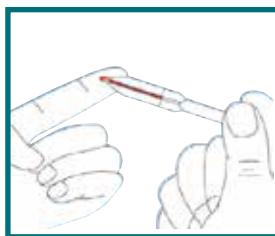

2 Tome la muestra con el tubo de transferencia capilar y colóquela sobre el dispositivo.



3 Lea los resultados



**CLEAN
DIAGNOSTICS**
Experiencia y calidad a su servicio

MEDIDOR DE LIPIDOS MISSION®

Permite realizar mediciones de Colesterol, HDL y Triglicéridos

Especificaciones Técnicas

Metodología	Fotómetro de reflexión
Rangos de medida	CHOL: 100-500 mg/dL. (2.59-12.93mmol/L, 1mmol/L=38.66mg/dL) HDL: 15-100 mg/dL. (0.39-2.59 mmol/L, 1mmol/L=38.66 mg/dL) TRIG: 45-650 mg/dL. (0.51-7.34 mmol/L, 1mmol/L=88.6 mg/dL).
Muestra	Sangre entera, suero o plasma.
Volumen de Muestra	10 uL para examen individual; 35 uL para examen 3-1.
Fuente de Energía	Fuente de Energía 4 baterías AAA (1.5v) Adaptador AC (Mini USB, 5v dc, 50 mA).
Vida de la Batería	85 horas o 1000 exámenes.
Unidades de Medida	Unidades de Medida Mg/dL, mmol/L.
Memoria	200 registros.
Apagado Automático	5 minutos después del último uso.
Tamaño del Lector	137mm × 79mm × 26mm (5.4" × 3.11" × 1.02").
Tamaño de la Pantalla	50mm × 50mm (1.97" × 1.97").
Peso	145g (sin baterías).
Condiciones de Almacenamiento del Lector	0 – 50°C (32 – 122°); ≤ 90% RH.
Condiciones de Operación	15 – 40°C (59 – 104°F); ≤ 90% RH.
Conectores del Lector	Cable USB para transferencia de datos o fuente de energía (opcional).

